

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Μόνο για οδοντιατρική χρήση



EUCALYPTOL

Προετοιμασία για την επίλυση γουταπέρκα
ΣΥΝΘΕΣΗ: έλαιο ευκαλύπτου

ΕΝΔΕΛΕΙΓΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Το προϊόν προορίζεται για χρήση κατά την ενδοδοντική θεραπεία εκ νέου για να αφαιρέσετε γουταπέρκα από το ριζικό σωλήνα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Πριν από την θεραπεία βυθίζετε την πιπέτα μέσα στην αλκοόλη

1. Βάλτε 1-2 σταγόνες του υγρού μέσα στο ριζικό σωλήνα με τη βοήθεια της πιπέτας
2. Αφαιρέστε την γουταπέρκα.
3. Χρησιμοποιήστε άλλη δόση της προετοιμασίας, εάν είναι απαραίτητο.
4. Σε περίπτωση που η γουταπέρκα εξακολουθεί να είναι ξηρή ή εύθραυστη, βάλτε EUCALPYTOL και πάλι.
5. Επαναλάβετε τη δράση όσο διάστημα χρειαστεί.

Το προϊόν προορίζεται για πολλαπλή χρήση, εκτός από την πιπέτα που είναι για μία μόνο χρήση.

Πολλαπλές χρήση της πιπέτας μπορεί να προκαλέσει τον κίνδυνο μόλυνσεως

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για τους ασθενείς με υπερευαισθησία στα συστατικά του προϊόντος.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Είναι ερεθιστικό για το βλεννογόνο της στοματικής κοιλότητας, το δέρμα και τα μάτια.
Σε περίπτωση επαφής ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Στην περίπτωση κατανάλωσης του προϊόντος μην κάνετε εμετό. Πιείτε άφθονο νερό.
Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Απαραίτητη η χρήση γαντιών, προστατευτικά ρούχα και προστατευτικά γυαλιά, ενώ δουλεύετε με το προϊόν.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Να φυλάσσεται στην αρχική συσκευασία σε κάτω των 25° C
Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

φιαλίδιο 10ml, πιπέτα



www.medicando.gr

info@medicando.gr

Tel: 210 2582902 Fax: 210 2582905

medicando



www.medicando.gr
info@medicando.gr

Tel: 210 2582902 Fax: 210 2582905